

Popis výrobku

Invacare® Spinx

Invacare® Spinx je invalidní vozík s mnoha možnostmi nastavení a rozsáhlým příslušenstvím. Abyste měli možnost váš Invacare® Spinx co nejvíce využívat a s ohledem na dodatečná nastavení, musí být vozík zkontrolován a seřízen odborníkem.

Doufáme, že i tento návod přispěje ke každodennímu zacházení s vaším invalidním vozíkem Invacare® Spinx .

Rám, opěrky nohou a pogumované obruče Invacare® Spinx jsou vyrobeny z vysoce jakostního hliníku.

Citlivé díly, teleskopické trubky opěradla a vnitřní části trubek opěrek nohou jsou vyrobeny z **ocele**. Sedadlo je vyrobeno **buď z vinylu nebo plyše, a lze jej sn**Polštář sedadla je vyroben z „Jemina“ a opěradlo sedadla je vyrobeno z „Jemina“ nebo nylonu. Polštářování sedadla je **vyrobeno s nylonu**

Tato příručka obsahuje popis jednotlivých částí invalidního vozíku a jednoduché možnosti nastavení, jak je třeba s Invacare® Spinx bezpečně zacházet a co je třeba při přepravě respektovat. Před prvním použitím tohoto vozíku si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Tato příručka také obsahuje popis upevňování obvyklých částí příslušenství a **jejich rozsáhlé přizpůsobení**.

Protože má Invacare® Spinx mnoho různých součástí a částí příslušenství, mohou se části příslušenství vašeho vozíku odlišovat od těch, které jsou zde zobrazeny.

PROSÍM RESPEKTUJTE!



Tento symbol znamená výstrahu.

Na následujících stranách je znázorněna řada bodů, které se týkají vaší osobní bezpečnosti. Pozorně si je přečtěte!


Invacare® ručí jen za změny výrobku, které byly provedeny autorizovaným a kvalifikovaným personálem **firmy** Invacare nebo byly výslovně schváleny **firmou** Invacare. Vyhrazujeme si právo na eventuální změny produktu **co se týká** vybavení a možností ve smyslu technického pokroku bez předchozího oznámení.

Nedodržování uvedených pokynů může vést k poranění osob **a/nebo** poškození výrobku.

- Dříve než invalidní vozík použijete, zkontrolujte následující body jeden po druhém:
 - zda jsou všechny části dobře upevněny na rámu.
 - zda jsou všechna kola a otočné knoflíky **pořádně** utaženy.
 - zda všechny brzdy a zařízení proti převrácení **nezávadně pracují**.
- Invalidní vozík nikdy nezvedejte za odnímatelné loketní opěrky, opěrky nohou, vzpěru opěradla nebo za přestavitelná posuvná držadla.
- Před nasednutím do vozíku nebo vystupováním z vozíku vždy zatáhněte brzdu.
- Nikdy nestoupejte na stupačky, pokud nasedáte do vozíku nebo z něj vystupujete, mohlo by dojít k **převržení**.
- Se změnou úhlu sedačky je vždy spojeno zvýšené riziko převrácení.
- Pogumované obruče mohou být **na základě** tření velmi horké, **takže si můžete poranit ruce**.
- Použijte ochranné zařízení proti převrácení.
- **Myslete na to, že je v případě mokrého a hladkého povrchu rovněž i na svahu snížena** účinnost brzdy ovládané doprovodnou osobou.
- Dbejte na dobré připevnění hnacích kol.
- Hnací kola **nesnímat**, pokud uživatel sedí na invalidním vozíku.
- Čím více jsou potahy opěradla volnější, tím hrozí větší riziko převrácení invalidního vozíku.
- Povrchy invalidního vozíku, jako např. rám nebo potahy, **mohou při**

ZVEDÁNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU

Invalidní vozík vždy zvedejte za místa na rámu, která jsou zobrazena na obrázku. Invalidní vozík nikdy nezvedejte za pohyblivé části, jako např. bočnice nebo opěrky nohou. Ujistěte se, že jsou opěradlo a posuvná držadla správně upevněna. **Rovněž si také přečtěte** kapitolu „Bezpečnostní pokyny a hnací technika“.

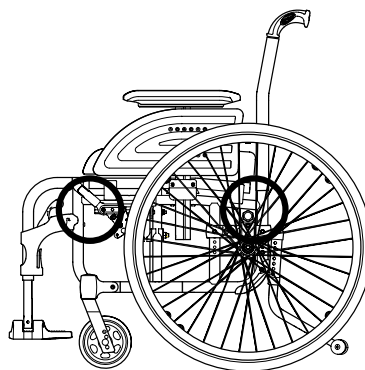

Použití k určenému účelu

- Invacare® Spinx je mechanický invalidní vozík, **jež** je vhodný pro uživatele, kteří svůj invalidní vozík budou používat po delší dobu (**několik hodin za sebou**).
- Invacare® Spinx byl vyvinut jak pro uživatele, kteří se mohou sami pohybovat na invalidním vozíku, tak i pro uživatele, kteří potřebují pomoc.
- **Invacare® Spinx je šikvný a má části příslušenství, jež dovolují přestavení polohy sedadla a tím umožňují pohodlné sezení i po delší dobu.**
- Invacare® Spinx disponuje četnými možnostmi nastavení. Se správným nastavením provedeným odborníkem je invalidní vozík pro uživatele rovněž i doprovodnou osobu vhodný jak k lehkému **přesouvání tak i k jednoduchému manévrování. A uživatel získá individuálně přizpůsobený tvar sedadla.** Možná nastavení jsou popsána v uživatelské příručce, která je dodána **současně s invalidním vozíkem.**
- Podle velikosti řídicích kol (100-200) můžete Invacare® Spinx používat jak **vevnitř** tak i venku. Doporučujeme velká kola, budete-li invalidní vozík používat na nerovném terénu.
- **Respektujte, že Invacare® Spinx se může překlomit popř. převrátit dozadu, pokud s ním pojedete nahoru, zejména při sklonu více než 80, nebo když jsou zadní kola ve směru upevnění řídicích kol namontována silněji.** U této polohy řídicích kol je možné s Invacare® Spinx snadněji **popojíždět**, než když je větší zátěž na řídicích kolech, ale následkem je, že se můžete snadněji převrátit **dozadu.** Použijte zařízení k ochraně proti převrácení, pokud existuje riziko, že se vozík převrátí, a také k dosažení vyšší stability.
- Invacare® Spinx byl vyvinut tak, aby mělo sedadlo polštáře, není-li použito síťové sedadlo. Pokud by však hrozilo nebezpečí **dekubitů**, doporučujeme použít vhodný polštář, protože síťové sedadlo nabízí jen základní rozdělení hmotnosti. **Jak polštář tak i síťové sedadlo zlepšují držení těla uživatele a umožňují komfortní sezení v invalidním vozíku po delší dobu.**
- Invacare® Spinx byste měli vždy používat s opěrkami nohou, **nehledě k tomu, že můžete na invalidním vozíku nastavit nepatrnou výšku sedu, abyste využili speciálních vlastností vozíku.**

Denní kontroly

Každý den zkontrolujte, zda jsou na invalidním vozíku pevně upevněny a připraveny k používání následující části:

- kola
- opěradlo
- zařízení k ochraně proti převrácení
- posuvná držadla
- opěrky nohou
- brzdy

Barvy **polstrování** a rámu

Polstrování

Černý nylon TR33, Černá Jemima TR18

Barvy rámu

Modrá, červená, černá, šedá (citronově zelená a oranžová na zvláštní přání)

Vybavení a příslušenství

Invacare® Spinx má rozsáhlé příslušenství a početné možnosti vybavení.

Opěradlo	Smyčkovité Přestavitelné potahy Třmen opěradla 2 polštáře Mistral
Sedadlo	Hloubka smyčkového sedadla nastavitelná na 5 cm Polstrované sedadlo Sedadlo s přestavitelným potahem a hloubkou
Polštář sedadla	Standardně 5 cm
Opěrky nohou	Pevná opěrka nohou 80° a 90° Úhlově přestavitelná opěrka nohou Opěrka nohy pro amputovanou končetinu Pevná stupačka Úhlově a hloubkově nastavitelná stupačka Nožní stupačka z jednoho kusu Pásky s háčky Lýtkový pás
Loketní opěrky	Sklopná loketní opěrka Výškově nastavitelná loketní opěrka Dlouhá nebo krátká poduška Automatické zablokování
Řídicí kola	100-200 mm, nahuštěná vzduchem nebo celopryžová, široká nebo úzká
Zadní kola	22", 24", nahuštěná vzduchem nebo odolná proti defektu
Brzda	Brzda pro uživatele Brzda ovládaná doprovázející osobou Prodloužená brzdová páka Jednopáková brzda
Ostatní	Různé druhy pogumovaných obručí Ochrana paprsků Zařízení k ochraně proti převrácení Reflektory Deska stolu Hustilka Držák Sada nástrojů Vnější posuvná držadla Pánevní pás Lapač nečistot Boční ochrana Stupňová trubka